

ベッド本体の取扱説明書と合わせてよくお読みいただき安全に作業してください。

## 緊急時の背下げ操作（停電・故障時などの対応）

背ボトムが上がっている状態で停電などの緊急時に背ボトムが、下げられなくなった場合に手で背ボトムを下げることができます。



### 注意

事故、破損、ケガをします。


- ◆必ず2人以上で作業をおこなってください。
- ◆必ず背ボトムを手で支えて作業をおこなってください。  
荷重がすべて背ボトムにかかり危険です。
- ◆スピードピンを外す際は、ラジオペンチやプライヤーを使用してください。

### 背下げの方法

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 療養されている方と寝具をベッドから降ろす
3. 作業をしやすくするため、ヘッドボードを取り外す
4. 背ボトムが落下しないように手で支える
5. 図の固定ピンとスピードピンを取り外す

### Point

- 外した固定ピン、スピードピンは、背ボトムを元に戻す際に使用します。紛失しないように保管してください。

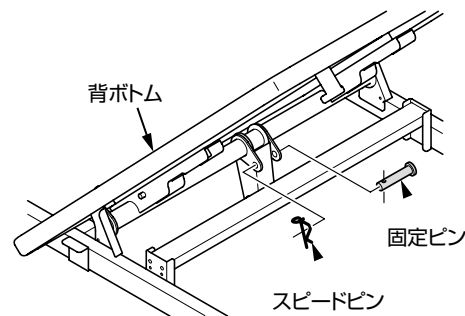

6. 背ボトムを手で支えながら下ろす
7. ヘッドボードを取り付け、寝具、療養されている方をベッドに戻す

### もどしかた

電力が回復したら以下の手順でベッドをもとの状態に戻してください。

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 療養されている方と寝具をベッドから降ろす
3. 作業をしやすくするため、ヘッドボードを取り外す
4. 背ボトムを手で支えて上に上げる
5. 固定ピンとスピードピンを取り付ける
6. 背ボトムを手で支えながら下ろす
7. ヘッドボードを取り付け、寝具、療養されている方をベッドに戻す