

平成 23 年 3 月 16 日

各位

パラマウントベッド株式会社

電動ベッドの停電時の対応について

この度の東北関東大震災の影響により、関東地区において、計画停電が予定されております。電動ベッドを現在ご使用いただいている皆様におかれましては、計画停電の実施にあたり、以下の通りご対応いただきますよう、ご連絡をさせていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、大変お手数ではございますが、ご購入いただきました販売店様またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせくださいますようお願いいたします。

記

■電動ベッド

停電時には動作をすることが出来なくなりますので、事前に「あたま」「あし」を完全に下げて水平状態にすることを、「たかさ」につきましては安全のため一番低くすることをお勧めいたします。

また、停電からの復旧時に全ての電気製品が一齐に運転を始めると故障の原因となる場合がございます。他の家電製品と同様に、念のため、事前に電源プラグをコンセントから抜き、停電からの復旧後に再び電源プラグをコンセントに差し込んでご使用ください。

停電時に手で背を水平にする方法ならびに緊急手動操作（停電ハンドルが付属されている電動ベッドのみ）の方法につきましては、取扱説明書および弊社ホームページ「新着情報/電動ベッドの停電時の対応について」をご確認くださいませようお願いいたします。

ご不明な点につきましては、ご購入いただきました販売店様及びパラテクノコールセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。

■お問合せ先

パラテクノコールセンター： 0120-54-8639 （住所：千葉県船橋市海神町南 1 丁目）

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：20（祝日・夏季休業・年末年始休業を除く）

※ 「パラテクノコールセンター」が計画停電の対象地域に該当する時間帯は、電話が繋がらない事が想定されますので、ご了承ください。

以上